




Turnikety pro jednoho pacienta pro dospělé a děti

Návod k použití



1

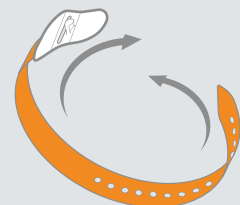

Protáhněte TourniSTRETCH kolem
kolíku končetin stranou nahoru

2




Protáhněte ocas přezkou a
podle toho napněte

3




Zatáhněte ocas dozadu přes
kolík pro zajištění pozice

4

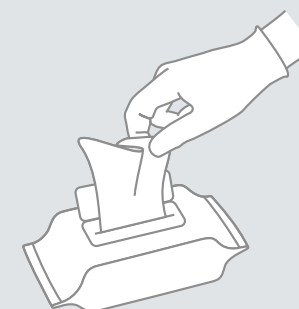


Vyjměte jeden ubrousek z
obalu a úplně jej rozložte

5

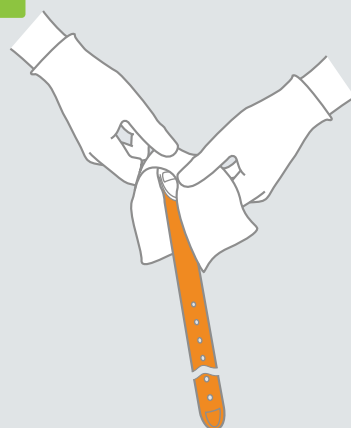

Očistěte sponu hadříkem

6

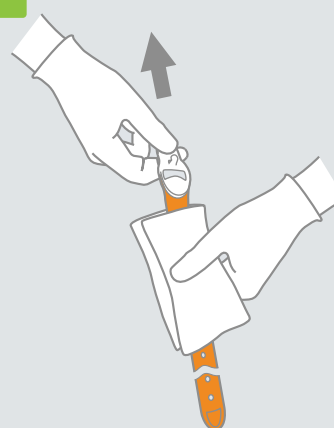


Podržte přezku a protáhněte
TourniSTRETCH utěrkou od
čisté po špinavou

7



Nechte TourniSTRETCH
vyschnout na vzduchu*

8

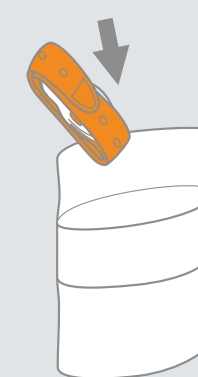

Umístěte TourniSTRETCH do
úložného vaku pro jednoho
pacienta pro opětovné použití



asephealthcare.com



*Ubrousky Clinell Universal Wipes jsou účinné proti většině organismů
během 10-30 sekund

Doporučené použití naleznete v pokynech Clinell Universal Wipe Guidelines