




Tourniquets für den Einzelpatientengebrauch
für Erwachsene und Kinder

Gebrauchsanweisung



1

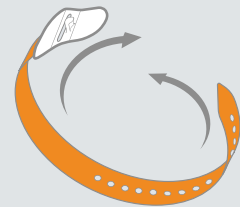

Führen Sie TourniSTRETCH mit der Stiftseite nach oben um die Gliedmaßen herum

2




Führen Sie den Schwanz durch die Schnalle und spannen Sie ihn entsprechend

3




Ziehen Sie den Schwanz zurück über den Stift, um die Position zu sichern

4

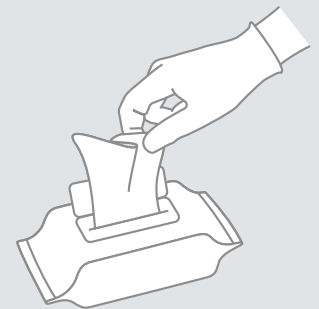


Nehmen Sie ein Tuch aus der Packung und entfalten Sie es vollständig

5

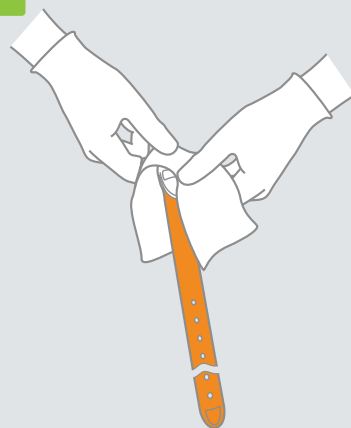

Reinigen Sie die Schnalle mit dem Tuch

6

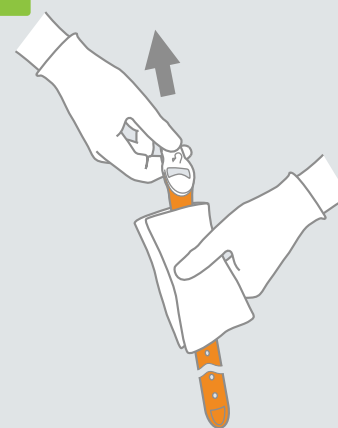


Halten Sie die Schnalle fest und ziehen Sie den TourniSTRETCH durch das Tuch von sauber nach schmutzig

7



Lassen Sie den TourniSTRETCH an der Luft trocknen*

8

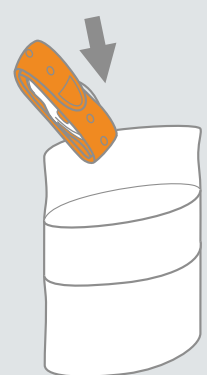

Legen Sie TourniSTRETCH zur Wiederverwendung in einen Einzelpatienten-Aufbewahrungsbeutel



DE



asephhealthcare.com



*Clinell Universal Wipes wirken gegen die meisten Organismen innerhalb von 10–30 Sekunden
Die empfohlene Verwendung finden Sie in den Clinell Universal Wipe Guidelines