


**Tourni
STRETCH**

**Tourni
STRETCH SP**

Ühe patsiendi jaoks mõeldud žgutid täiskasvanutele ja lastele Kasutusjuhend



1

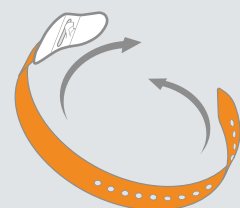

Viige TourniSTRETCH ümber
jäseme tihti pool ülespoole

2




Lükake saba läbi pandla ja
pingutage vastavalt

3




Kinnitamiseks tõmmake saba üle
tihti tagasi

4

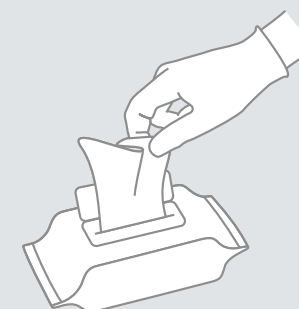


Eemaldage pakendist üks salvrätik
ja keerake see täielikult lahti

5

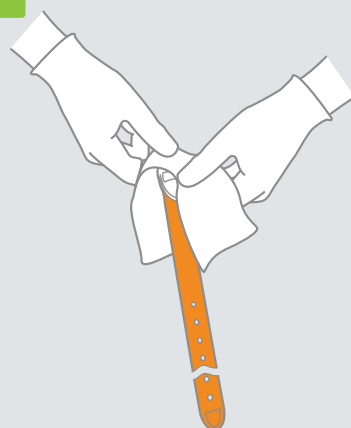

Puhastage lukk salvrätikuga

6

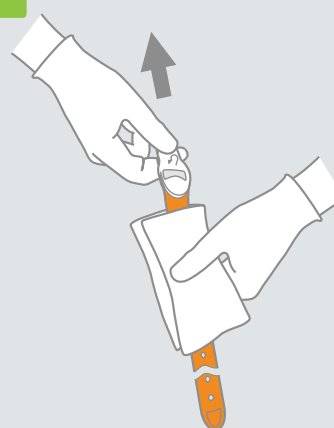


Hoidke pandlast ja tõmmake
TourniSTRETCH läbi lapi puhtast
määrdunudni

7



Laske TourniSTRETCHil õhu käes
kuivada*

8

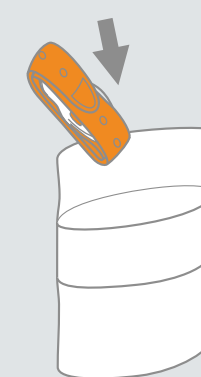

Asetage TourniSTRETCH
korduskasutamiseks ühe patsiendi
hoiukotti



asephhealthcare.com



*Clinell universaalsed salvrätikud toimivad enamiku organismide vastu 10-30 sekundi jooksul
Soovitatud kasutamise kohta vaadake Clinelli universaalsete puhastuspuhastusjuhiste juhiseid

**ASEP
HEALTHCARE**