

**Tourni
STRETCH**


**Tourni
STRETCH SP**

Torniquetes de uso de una sola
paciente para uso adulto y pediátrico

Instrucciones de uso



1

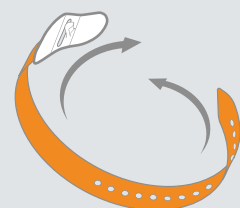

Pase TourniSTRETCH alrededor
de la clavija de la extremidad hacia
arriba

2




Pase la cola a través de la hebilla y
tense en consecuencia

3




Tire de la cola hacia atrás sobre la
clavija para asegurar la posición

4

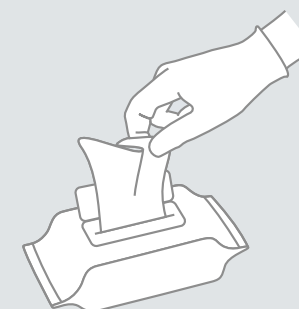


Retire una toallita del paquete y
despliegue completamente

5

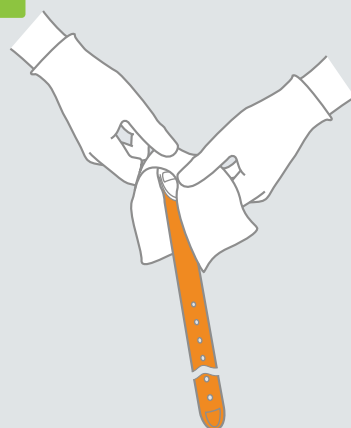

Limpiar la hebilla con la toallita

6

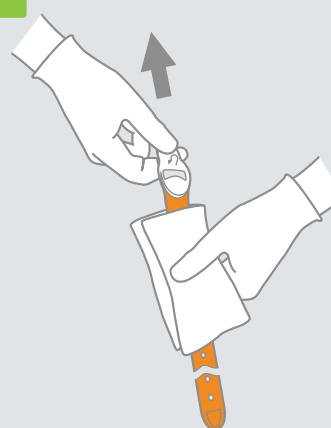


Sostenga la hebilla y tire del
TourniSTRETCH a través de la
toallita de limpio a sucio

7



Deja que la TourniSTRETCH se
seque al aire.*

8

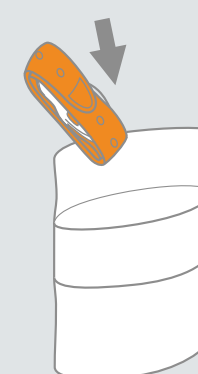

Coloque TourniSTRETCH en una
bolsa de almacenamiento para un
solo paciente para su reutilización



ES



asephhealthcare.com



*Las toallitas universales Clinell son efectivas contra la mayoría de los organismos
en 10 a 30 segundos

Consulte las pautas de toallitas universales de Clinell para conocer el uso recomendado.

**ASEP
HEALTHCARE**

Rev 1 ES