




Yhdelle potilaalle tarkoitettut
opasteet aikuisille ja lapsille
Käyttöohjeet



1

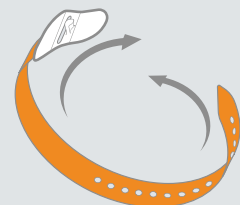

Ohjaa TourniSTRETCH raajan
tappipuoli ylöspäin

2




Syötä häntä soljen läpi ja kiristä
vastaavasti

3




Vedä häntä taaksepäin tapin yli
varmistaaksesi sen

4

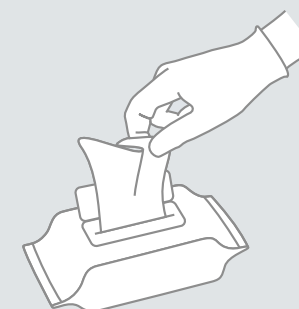


Poista yksi pyyhe pakkauksesta ja
avaa se kokonaan

5

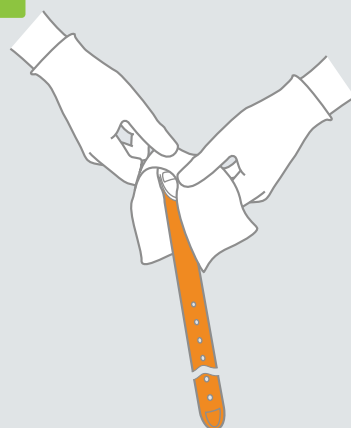

Puhdista solki pyyhkeellä

6

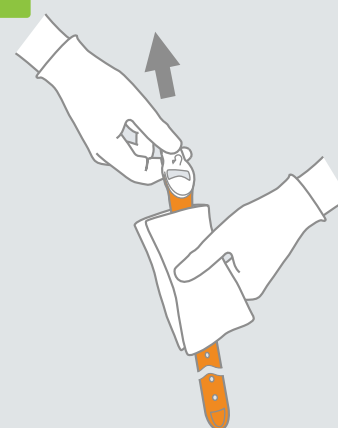


Pidä kiinni soljesta ja vedä
TourniSTRETCH pyyhkeen läpi
puhtaasta likaiseen

7



Anna TourniSTRETCHin kuivua
ilmassa*

8

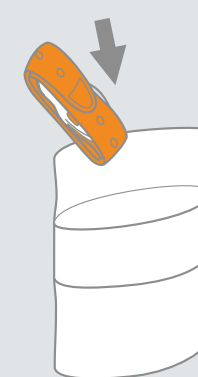

Aseta TourniSTRETCH yhden
potilaan säilytyspussiin
uudelleenkäyttöä varten



asephealthcare.com



*Clinell Universal Wipes -pyyhkeet ovat tehokkaita useimpia
organismeja vastaan 10-30 sekunnissa

Katso suositeltu käyttö kohdasta Clinell Universal Wipe Guidelines