

**Tourni
STRETCH**


**Tourni
STRETCH SP**

Τορνίκια χρήσης ενός ασθενούς
για ενήλικες & παιδιατρική χρήση

Οδηγίες χρήσης




1

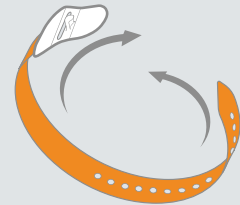

Περάστε το TourniSTRETCH
γύρω από το μανταλάκι του
άκρου προς τα πάνω

2

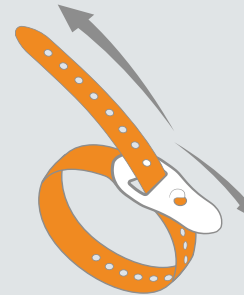


Πάσο TourniSTRETCH
στρογγυλοποιήστε την πλευρά
του μανταλιού του άκρου προς
τα πάνω

3




Τραβήξτε την ουρά προς τα πίσω
πάνω από το μανταλάκι για να
ασφαλίσετε τη θέση

4

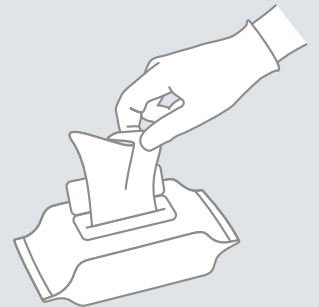


Αφαιρέστε ένα μαντηλάκι από τη
συσκευασία και ξεδιπλώστε
πλήρως

5

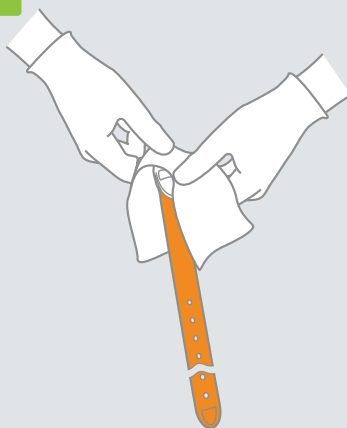

Καθαρίστε την πόρπη με το
μαντηλάκι

6

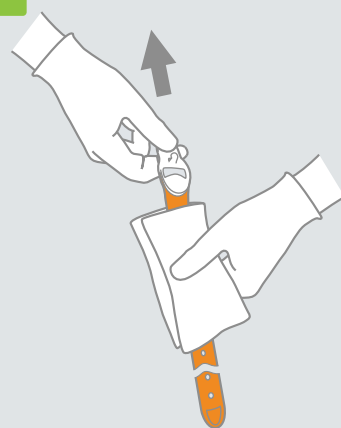


Κρατήστε την πόρπη και
τραβήξτε το TourniSTRETCH
μέσα από το μαντηλάκι από
καθαρό σε βρώμικο

7



Αφήστε το TourniSTRETCH να
στεγνώσει στον αέρα*

8

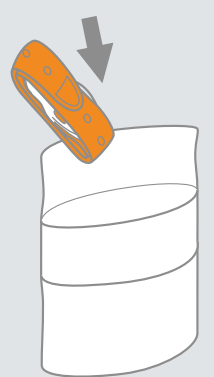

Τοποθετήστε το TourniSTRETCH
σε σάκο αποθήκευσης ενός
ασθενούς για
επαναχρησιμοποίηση



GR



asephhealthcare.com



*Τα μαντηλάκια Clinell Universal είναι αποτελεσματικά ενάντια
στους περισσότερους οργανισμούς μέσα σε 10-30 δευτερόλεπτα
Ανατρέξτε στις Οδηγίες καθαρισμού της Clinell Universal Wipe
για συνιστώμενη χρήση

**ASEP
HEALTHCARE**

Rev 1 GR