

Tourni  
**STRETCH**


Tourni  
**STRETCH SP**

Egyszeri beteghasználatú tornák  
felnőttek és gyermekek számára

## Használati útmutató



1

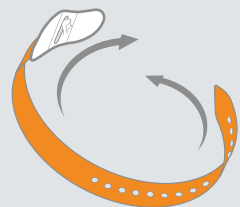

Adja át a TourniSTRETCH-et a  
végtag rögzítőjével felfelé

2




Vezesse át a farkot a csaton,  
és ennek megfelelően feszítse  
meg

3




A rögzítéshez húzza vissza a  
farkát a csapra

4

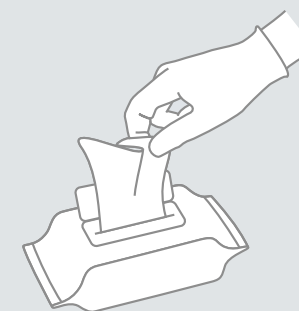


Vegyen ki egy törölkendőt a  
csomagolásból, és hajtsa ki  
teljesen

5

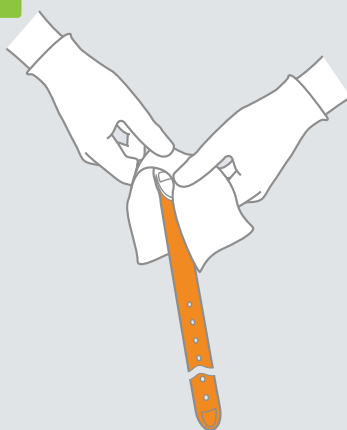

Tisztítsa meg a csatot a  
törölkendővel

6

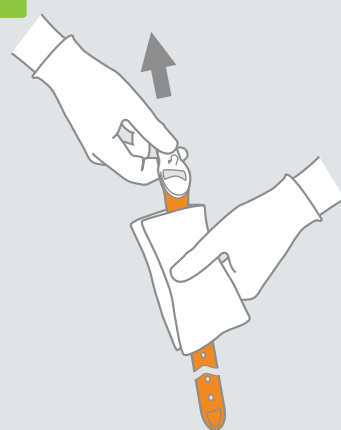


Fogja meg a csatot, és húzza  
át a TourniSTRETCH-et a  
törölkendőn, tisztaról piszkosra

7



Hagyja a TourniSTRETCH-et  
levegőn megszáradni\*

8

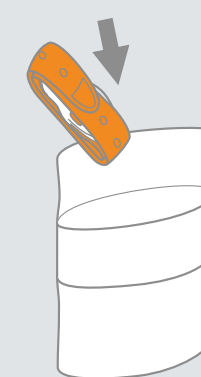

Helyezze a TourniSTRETCH-et  
az egybeteg tárolótáskába az  
újrafelhasználáshoz



HU



asephealthcare.com



\*A Clinell univerzális törölkendők 10-30 másodpercen belül  
hatásosak a legtöbb szervezet ellen  
A javasolt használathoz lásd a Clinell univerzális törölkendőre  
vonatkozó irányelveit

**ASEP**  
HEALTHCARE