




Lacci emostatici monopaziente
per uso adulto e pediatrico

Istruzioni per l'uso



1

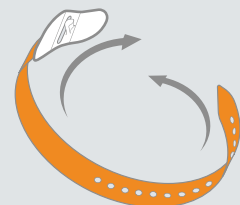

Passa TourniSTRETCH attorno al
piolo dell'arto con il lato rivolto
verso l'alto

2




Far passare la coda attraverso la
fibbia e tendere di conseguenza

3




Tirare indietro la coda sopra il
piolo per fissare la posizione

4

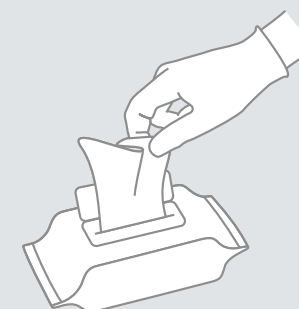


Rimuovere una salvietta dalla
confezione e aprirla
completamente

5

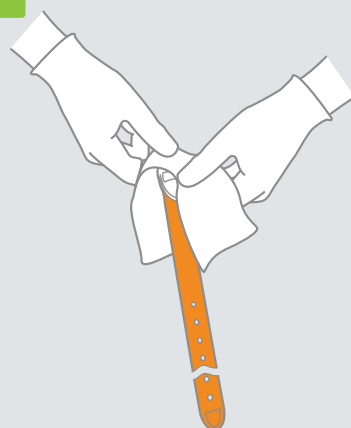

Pulisci la fibbia con la salvietta

6

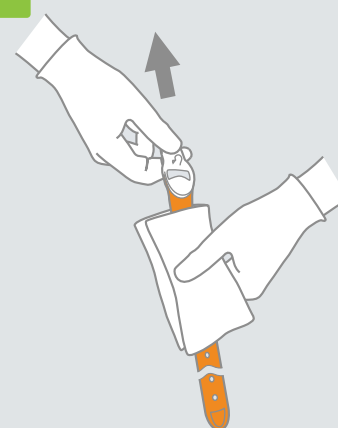


Tenere la fibbia e tirare il
TourniSTRETCH attraverso la
salvietta da pulito a sporco

7



Lasciare asciugare all'aria il
TourniSTRETCH*

8

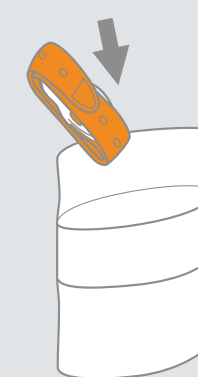

Posizionare TourniSTRETCH nella
borsa di conservazione per
paziente singolo per il riutilizzo



IT



asephealthcare.com



*Clinell Universal Wipes è efficace contro la maggior parte degli organismi
entro 10-30 secondi

Fare riferimento alle linee guida Clinell Universal Wipe per l'uso consigliato