

**Tourni
STRETCH**


**Tourni
STRETCH SP**

Turniketai vienam pacientui,
skirti suaugusiems ir vaikams

Naudojimo instrukcijos



1

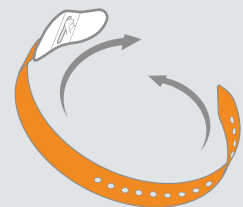

Perkelkite TourniSTRETCH
aplink galūnės kaiščio pusę į
viršų

2




Įkiškite uodegą per sagtį ir
atitinkamai įtempkite

3




Patraukite uodegą atgal per kaištį,
kad užtikrintumėte tvirtą padėtį

4

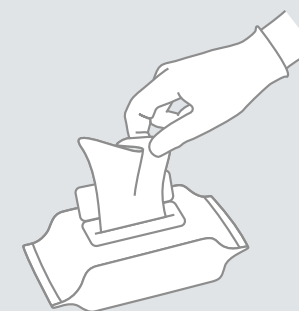


Iš pakuotės išimkite vieną
servetėlę ir visiškai išskleiskite

5

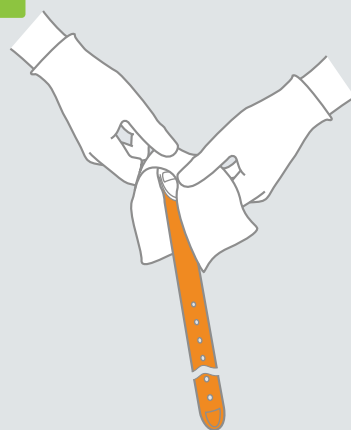

Nuvalykite sagtį servetėle

6

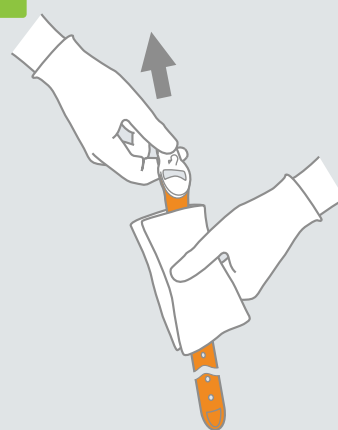


Laikykite sagtį ir traukite
TourniSTRETCH per šluostę
nuo švarios iki nešvarios

7



Palikite TourniSTRETCH ore
išdžiūti*

8

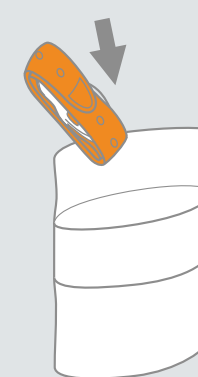

Įdėkite TourniSTRETCH į vieno
paciento laikymo maišelį
pakartotiniam naudojimui



LT



asephhealthcare.com



*Clinell universalios servetėlės suveikia daugumą organizmų
per 10-30 sekundžių
Rekomenduojamo naudojimo ieškokite Clinell universaliųjų
šluosčių gairėse

**ASEP
HEALTHCARE**

Rev 1 LT