




Viena pacienta lietošanas turniketi
pieaugušajiem un bērniem

Lietošanas instrukcija



1

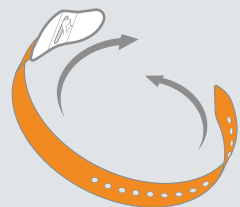

Apvelciet TourniSTRETCH ap
ekstremitāšu tapas pusi uz
augšu

2




Izvelciet asti caur sprādzi un
attiecīgi nosprieģojiet

3




Pavelciet asti atpakaļ pāri tapai,
lai nostiprinātu pozīciju

4

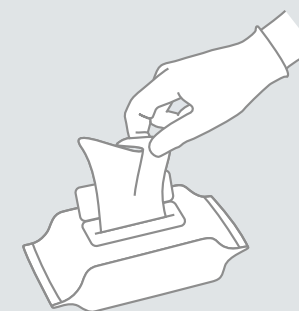


Izņemiet vienu salveti no
iepakojuma un pilnībā atlociet

5

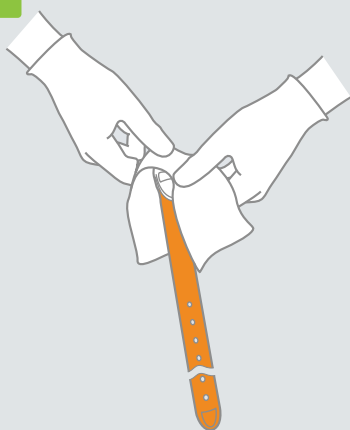

Notīriet sprādzi ar salveti

6

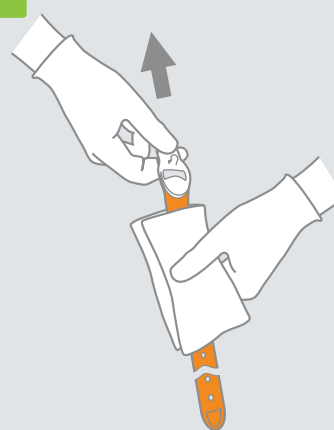


Turiet sprādzi un izvelciet
TourniSTRETCH caur salveti no
tīras līdz netīrai

7



Atstājiet TourniSTRETCH gaisā
nožūt*

8

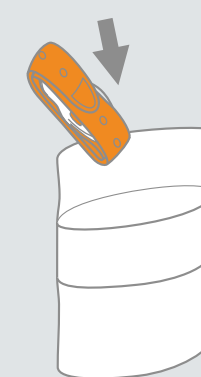

Ievietojiet TourniSTRETCH viena
pacienta uzglabāšanas maiņā
atkārtotai lietošanai



LV



asephealthcare.com



*Clinell universālās salvetes iedarbojas pret lielāko daļu organismu
10-30 sekunžu laikā

Skatiet Clinell universālās salvetes vadlīnijas par ieteicamo lietošanu