

**Tourni  
STRETCH**


**Tourni  
STRETCH SP**

Opaski uciskowe do użytku przez  
jednego pacjenta dla dorosłych i dzieci

## Instrukcja użycia



**1**

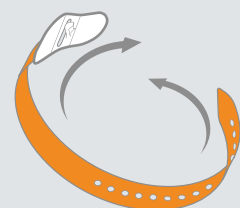

Przełóż TourniSTRETCH wokół  
kołka kończyny stroną do góry

**2**




Przełóż ogon przez sprzączkę  
i odpowiednio napnij

**3**




Przeciśnij ogon z powrotem  
na kołek, aby zabezpieczyć  
pozycję

**4**

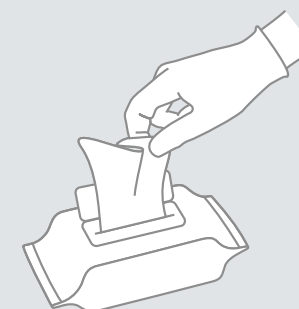


Wyjmij jedną chusteczkę z  
opakowania i całkowicie rozłóż

**5**

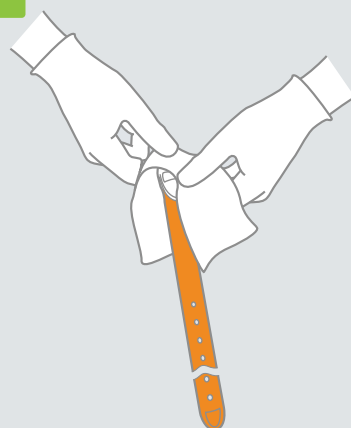

Wyczyść sprzączkę  
ścierką

**6**

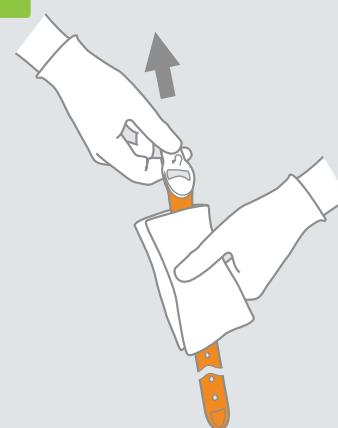


Przytrzymaj klamrę i  
przeciśnij TourniSTRETCH  
przez ściereczkę od czystej do  
brudnej

**7**



Pozostaw TourniSTRETCH do  
wyschnięcia\*

**8**

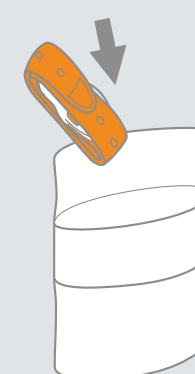

Umieść TourniSTRETCH w  
pojedynczej torbie do  
przechowywania pacjenta do  
ponownego użycia



PL



asephhealthcare.com



\* Uniwersalne chusteczki Clinell są skuteczne przeciwko  
większości organizmów w ciągu 10-30 sekund  
Zalecane użycie można znaleźć w wytycznych Clinell  
Universal Wipe Guidelines

**ASEP  
HEALTHCARE**