


**Tourni
STRETCH**

**Tourni
STRETCH SP**

Garouchete pentru un singur
pacient pentru adulți și copii
Instrucțiuni de folosire



1

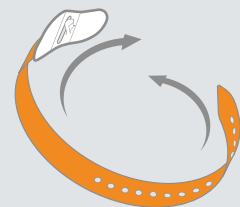

Treceți TourniSTRETCH în jurul
piciorului membrilor cu partea
în sus

2




Treceți coada prin cataramă
și tensionați corespunzător

3




Trageți coada înapoi peste cui
pentru a se asigura

4

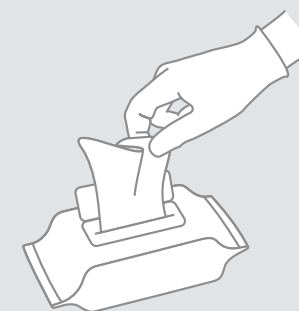


Scoateți un șervețel din
ambalaj și desfăceți complet

5

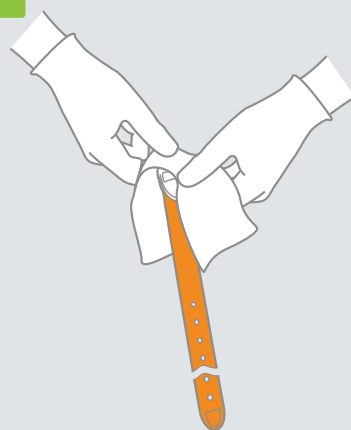

Curățați catarama cu
șervețelele

6

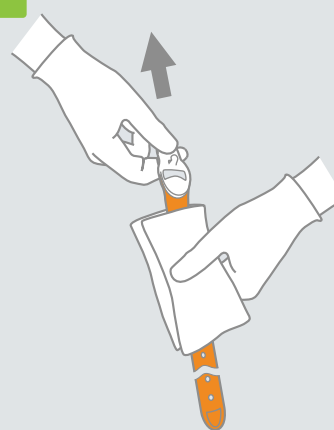


Țineți catarama și trageți
TourniSTRETCH prin șervețel
de la curat la murdar

7



Lăsați TourniSTRETCH să se
usuce la aer*

8

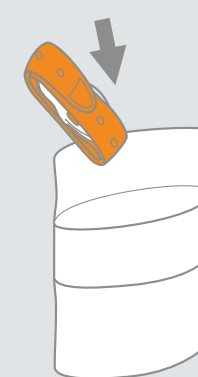

Puneți TourniSTRETCH într-o
pungă de depozitare pentru un
singur pacient pentru
reutilizare



RO



asephhealthcare.com



*Șervețelele universale Clinell sunt eficiente împotriva
majorității organismelor în 10-30 de secunde
Consultați Ghidurile Clinell Universal Wipe pentru utilizarea
recomandată

**ASEP
HEALTHCARE**

Rev 1 RO