





Turniquet för enstaka patienter för vuxen och pediatrik användning

Användningsinstruktioner

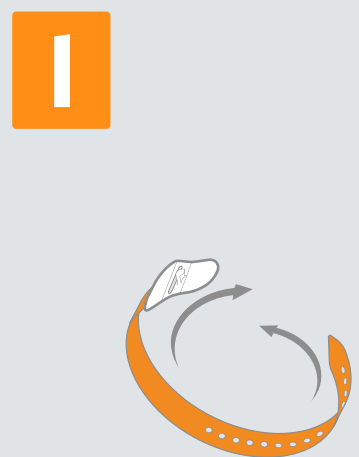

1 Passera TourniSTRETCH runt benpinnen uppåt

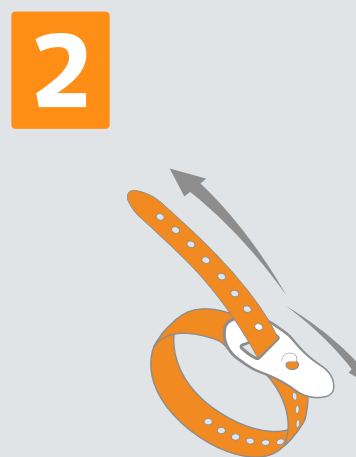


2 Mata svansen genom spännet och spänn därefter




3 Dra svansen bakåt över pinnen för att säkra positionen




4 Ta bort en torkduk ur förpackningen och vik ut helt

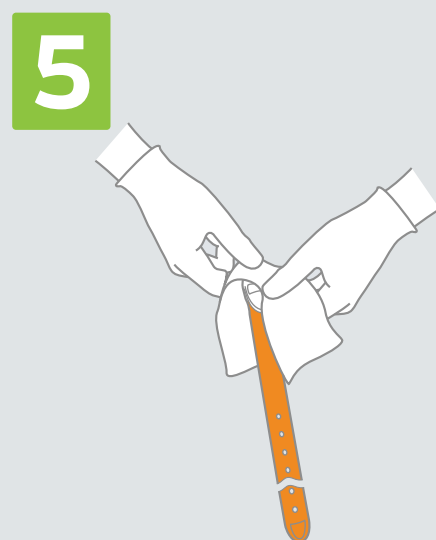

5 Rengör spännet med torkduken

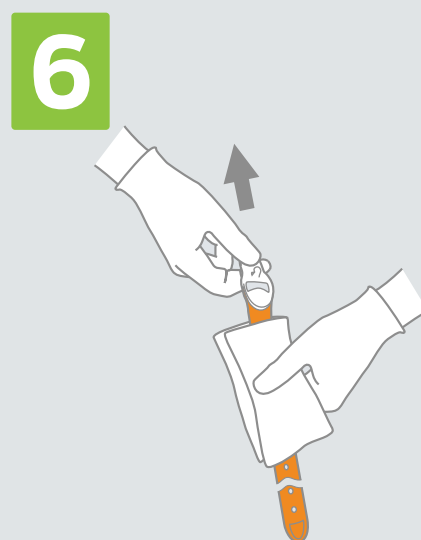

6 Håll i spännet och dra TourniSTRETCH genom torkduken från ren till smutsig

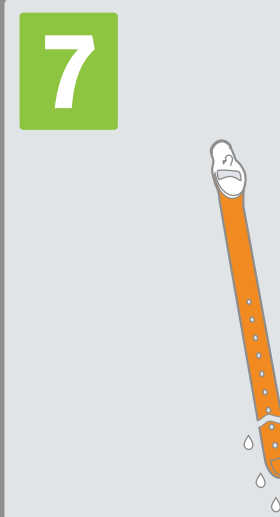

7 Låt TourniSTRETCH lufttorka*



8 Placera TourniSTRETCH i en förvaringspåse för enkel patient för återanvändning



asephhealthcare.com



*Clinell Universal Wipes är effektiva mot de flesta organismer inom 10-30 sekunder

Se Clinell Universal Wipe Guidelines för rekommenderad användning