


**Tourni
STRETCH**

**Tourni
STRETCH SP**

Turniket na použitie pre jedného
pacienta pre dospelých a deti
Inštrukcie na používanie



1

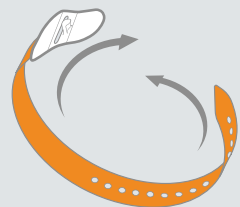

Prejdite TourniSTRETCH okolo
kolíka končatín stranou nahor

2




Prevlečte chvost cez pracku
a podľa toho napnite

3




Potiahnite chvost dozadu cez
kolík, aby ste ho zaistili

4

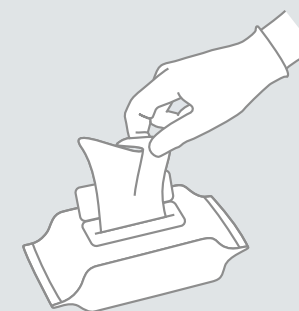


Vyberte jednu utierku z balenia
a úplne ju rozložte

5

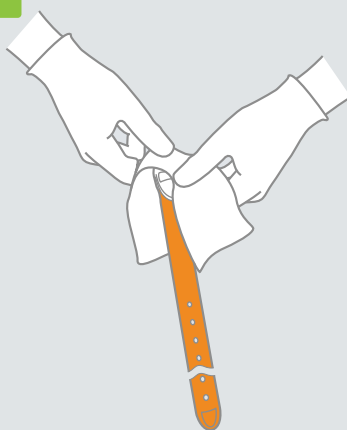

Vyčistite pracku utierkou

6

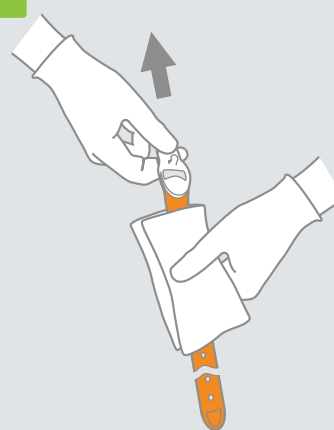


Podržte pracku a potiahnite
TourniSTRETCH cez utierku
od čistej po špinavú

7



Nechajte TourniSTRETCH
vyschnúť na vzduchu*

8

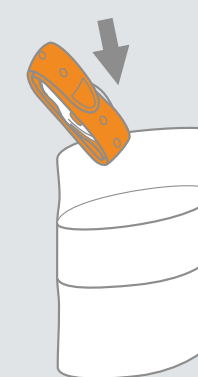

Umiestnite TourniSTRETCH do
úložného vrečka pre jedného
pacienta na opätovné použitie



SK



asephhealthcare.com



*Utierky Clinell Universal Wipes sú účinné proti väčšine
organizmov do 10-30 sekúnd
Odporúčané použitie nájdete v pokynoch pre univerzálne
utierky Clinell

**ASEP
HEALTHCARE**

Rev 1 SK