



# Laccio emostatico monouso

## Istruzioni per l'uso



 [asephhealthcare.com](http://asephhealthcare.com)



1 Sbucciare per esporre l'adesivo



2 Passa intorno al braccio con il lato stampato rivolto verso l'alto



3 Tensione a due mani



4 Tensione a due mani



5 Riposizionamento (se necessario) - Allentare la striscia e riposizionarla alla tensione richiesta sulla striscia adesiva



6 Smaltire Tournistrip nel cestino dei rifiuti clinici