



Tourniquet Użu Uniku Struzzjonijiet għall-użu



 asephhealthcare.com



1 Qaxxar biex tesponi l-adeżiv



2 Għaddi madwar id-driegħ stampat naħa 'l fuq



3 Tensjoni b'żewġ idejn



4 Tensjoni b'żewġ idejn



5 Pożizzjonament mill-ġdid (jekk meħtieġ) - Holl l-istrixxa 'l bogħod u ibdel għat-tensjoni meħtieġa fuq l-istrixxa li tehel



6 Armi Tournistrip fil-bin tal-iskart kliniku